

Anleitung zum Befüllen

Spendereimer TerraClean



- 1.**
Die Rolle aus der Folie nehmen und in den Eimer einsetzen.



- 2.**
1,5 Liter Terraseptan Flächendesinfektionsmittel in den Messbecher füllen und dabei die Sicherheitsvorschriften beachten.



- 3.**
Das Terraseptan Flächendesinfektionsmittel mithilfe des Messbechers in den Eimer füllen.



- 4.**
Ein Tuch aus der Mitte der Rolle durch die die Deckelöffnung ziehen, dann den Deckel des Eimers mit leichtem Druck fest verschließen.



- 5.**
Nach ca. einer Stunde sind die Tücher mit Desinfektionsmittel getränkt (die ersten 2 Tücher sind noch trocken).
Das befüllte Spendersystem ist bis zu 4 Wochen einsatzbereit.

Art. 1.900 100